


Vivago Zorghorloge en basisstation INSTALLATIE THUIS

De Vivago is geleverd in een doos met daarin de volgende inhoud: Een Vivago zorghorloge met oplader; Een basisstation (ook DOMI genoemd); Een oplader met micro usb aansluiting.

1. In het basisstation zit een kleine gele schakelaar met de tekst ON en OFF. Schuif de schakelaar omlaag op status ON. Er zullen nu rode, blauwe en groene LED-lampjes knipperen.



2. Plaats de bovenkant weer op de onderkant, zorg dat de bedrading niet beklemd raakt. Sluit het basisstation aan op de netstroom met de bijgeleverde oplader. Het basisstation is klaar voor gebruik wanneer het blauwe licht rondom de rode knop stopt met knipperen.

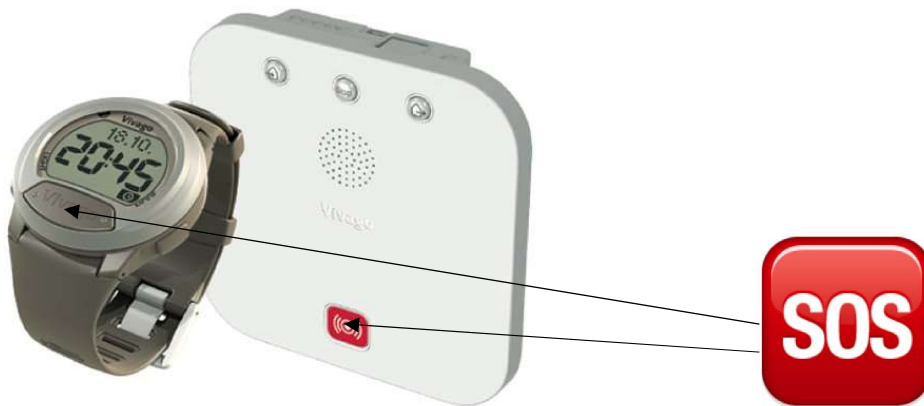

Uitleg en check gebruik Vivago:

Controleer de status van uw basisstation

- ✓ Het basisstation is aangesloten op het stopcontact.
- ✓ Het blauwe lampje rondom de rode knop brandt constant.

Alarmeren zorghorloge Vivago: U maakt een alarm door de grote 'Vivago' knop op het horloge in te drukken totdat er een rood lampje op het horloge gaat branden. Het basisstation geeft een piep signaal af en gaat rood branden. U kunt ook alarm maken door de rode knop op het basisstation in te drukken. Het basisstation geeft een piep signaal af en het blauwe lampje gaat tijdelijk rood knipperen. De meldkamer neemt nu contact met u op via het basisstation, waarmee u op afstand kunt spreken en luisteren. Bij geen reactie worden uw contactpersonen ingeschakeld.